

Achtergrond

- 86-jarige dame.
- Heeft tijdens het tuinieren een letsel opgelopen waarvoor medische behandeling van L1# nodig is.
- Ze heeft een acute Clostridium difficile-infectie in de dikke darm opgelopen.
- Na een mislukte fecale microbiota transplantie (FMT) werden een speedlaparotomie en een subtotale colectomie uitgevoerd, met als resultaat een definitief eindstandig ileostoma.

Postoperatieve ontwikkeling

- De ontstane eindstandige ileostoma had een goede afmeting en heeft een diameter van 32 mm.
- De mucocutane anastomose was intact.
- Ongeveer 5 cm naast de stoma zat een geautolyseerd intra-abdominaal hematoom.
- De wond had proximale en distale dehiscentie vlakbij de stoma die van invloed was op de stomazorg.

Verpleegkundig advies

Om zowel lekkage van de ileostoma te voorkomen als exsudaat uit de wond te absorberen, werd een **eakin freeseal**[®] in combinatie met een soft convex huidplaat geadviseerd.

eakin freeseal[®] werd gekozen vanwege de goede hechting, het gebruiksgemak en extra dun formaat om onder alle diepten en mate van convexiteit te gebruiken.

Veilige routine met eakin freeseal[®]

De patiënt werd voor 3 weken behandeld met negatieve druktherapie (NDT) om het wondbed te verkleinen.

Huid: De peristomale huid blijft intact doordat lekkage uitblijft en de pastaring het wondexsudaat absorbeert.


Stomazorg: Vertrouwen opbouwen met haar stoma en streven naar twee wissels per week. **Eakin freeseal**[®] is een vast onderdeel van deze verzorging.

Bigger Life: Het geeft emotionele en psychologische steun om de acceptatie te vergroten.

Postoperatieve wond en stoma



Wondexsudaat en stoma-output geabsorbeerd door **eakin freeseal**[®]

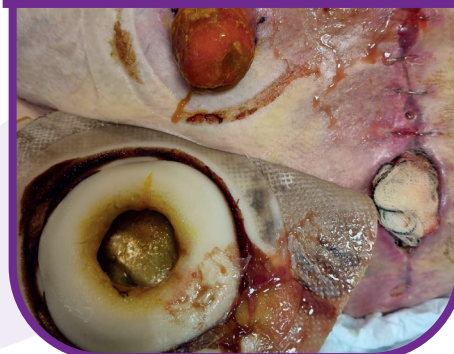

De integriteit van de huid blijft behouden rond de stoma en de wond

