

## Geschiedenis

- 69 jarige dame.
- 2017: Endeldarmkanker behandeld met chemotherapie en radiotherapie waarna remissie en in 'Wait and See' studie.
- 2019: Recidief endeldarmkanker waarvoor APR met aanleg colostoma.




## Ervaren problemen

- Vanaf 2020 pijn bij stoma zonder zichtbare afwijkingen. Later in 2020 bultjes bij stoma te zien, leek op oppervlakkige hypergranulatie.
- Behandeling met zilvernitraat, Terracotril, Aldanex, Lidocaïne, pastaringen en Prontosan geen resultaat.
- 2021: er volgde een stomarevisie. Dit leek eerst succesvol, maar er volgde een dehiscentie van de stoma, daarna kreeg ze een stoma op huidniveau.
- Er ontstonden wederom oppervlakkige, zeer pijnlijke bultjes.
- Behandeling met zilvernitraat deels succesvol, maar pijn bij stomarand bleef.
- Wegens pijnlijke huid 2-3 materiaalwissels per dag.

## Verpleegkundig advies

Meerdere pastaringen en stomazakjes geprobeerd zonder succes. **Granulomen** en **pijnlijke peristomale huid** bleven bestaan.

eakin **freeseal**<sup>®</sup> met een eakin<sup>®</sup> soft convex stomazakje werd geadviseerd door Laura Han, stomaverpleegkundige Haaglanden Medisch Centrum.

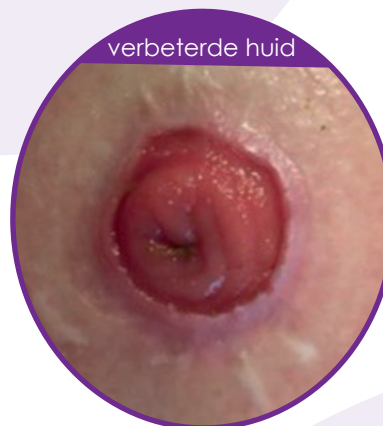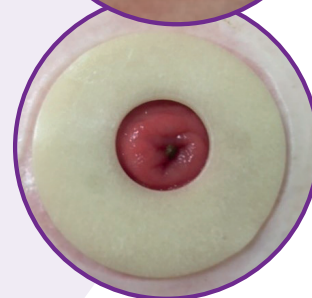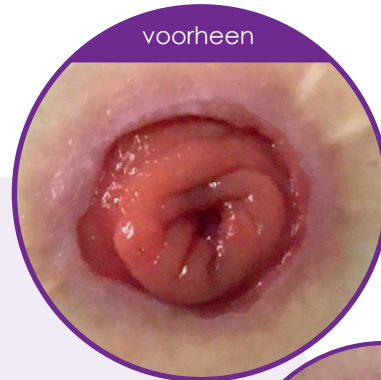

## De oplossing met eakin freeseal<sup>®</sup>

Na 2 jaar zoeken naar een oplossing, heeft eakin **freeseal**<sup>®</sup> haar stomazorg veranderd.

**Huid:** Granulomen bijna verdwenen en de peristomale huid is volledig genezen.

**Stomaverzorging:** Slechts 1 wissel per dag zonder extra behandelingen.

**Kwaliteit van leven:** Mevrouw is pijnvrij en is zich niet meer de hele dag bewust van haar stoma. Ze zegt hierover:

*“Ik heb eindelijk weer een normaal leven en ik ben een gewone stomadrager geworden!!”*