

voor het behandelen van een ileostoma met waterdunne ontlasting die peristomale huidproblemen veroorzaakt.

Casestudy ingediend door Marjon Gerbrands, stomaverpleegkundige, Nederland

Geschiedenis

- 77 jarige dame, ernstig gehoorverlies sinds 3^e levensjaar (mazelen).
- 2015: herseninfarct doorgemaakt, dit werd in 2016 pas ontdekt.
- 2017: ileus in colon doorgemaakt, 2/3de van colon verwijderd, aanleg ileostoma.
- Tijdens operatie bij toeval een tumor ontdekt, daarom ook een stukje dunne darm verwijderd.
- Het infarct veroorzaakte aangezichtsverlamming die leidde tot dysfagie.
- 2018: Mevr. krijgt sondevoeding via Mic-Key button, tussen 7.00 en 19.00 uur.
- 100% Sondevoeding; elk uur 100 ml voeding en 90 ml water.
- Output extreem dun - 600-700ml/24 uur.
- Man verzorgt stoma.

Ervaren problemen

- Toename van gewicht, post-operatief van 33 kg naar 52 kg, heeft ertoe geleid dat de stoma op huidniveau ligt.
- Daarnaast veel fijne huidplooitjes rond de stoma.
- Peristomale huid was steeds geïnfecteerd en gaf hypergranulatie.
- Gebruik van ander merk stomapasta en pastaring in de hoop infectie te voorkomen
- Lekkages en geïnfecteerde peristomale huid hielden aan
- Daarom dagelijkse wissel als gevolg van constante lekkage.

Verpleegkundig advies

Na het testen van zowel 1-delige als 2-delige stomazakjes, gebruik van pasta, pastaringen en zelfs fixeerstrips om lekkages proberen te beperken, bleef **hypergranulatie** en **pijnlijke peristomale huid** aan.

In augustus 2021 werd door Kim van der Maas, stomaverpleegkundige bij het Radboudumc, toestemming gegeven om de nieuwe eakin **freeseal**[®] te testen.

Voor




Oplossingen met eakin freeseal®

Na 3,5 jaar zoeken naar een oplossing had eakin **freeseal®** een enorme impact op de stomazorg van mevrouw.

Huid: Huidirritatie was snel verdwenen. Lekkages komen niet meer voor en daardoor is haar peristomale huid volledig genezen en heeft mevrouw geen hypergranulatie meer.

Stomazorg: Slechts 1 wissel per 2 dagen nodig, waarbij het zakje 3 - 4 keer per dag wordt geleegd vanwege de waterige output.

Bigger Life: Mevrouw voelt zich veilig bij het gebruik van eakin **freeseal®** en haar man is blij met het gebruiksgemak en dat de freeseal® zich aanpast aan de vorm van haar stoma - dit resulteert in een makkelijke, snelle wissel.

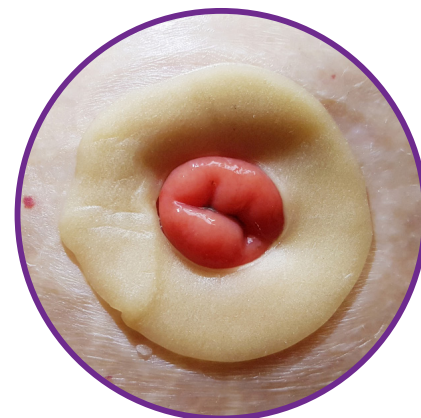

Economische impact met eakin freeseal®

De stomazorg is teruggebracht van dagelijks naar eens per 2 dagen. Leidend tot

verminderd productverbruik: 48%.*

Dit heeft **positieve invloed op:**

- lagere jaarlijkse kosten van stomaproducten.
- verbruik van extra producten om peristomale huidproblemen en hypergranulatie te behandelen.
- de zorgtijd die nodig is om de bijkomende complicaties van de stomadrager te behandelen.
- het milieu, doordat er minder stomaproducten worden gebruikt.

Belangrijker nog, **kwaliteit van leven** is aanzienlijk verbeterd voor deze mevrouw.

*gebaseerd op het gemiddelde gebruik van zowel stomazak als pastaringen die in deze casestudy worden beschreven.

