

Kies eakin **dot**® 1-delig bij een gecompliceerd stoma

Case study ingediend door: Irene de Groot, Verpleegkundig Specialist, Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer, Nederland

GESCHIEDENIS

- 53-jarige man, heftruckchauffeur.
- 2017: LAR vanwege groot villos adenoom in het rectum.
- 2018: Naadlekkage anastomose.
- 2019: Ernstige rectoanale fisteling.
- 2020: Aanleg eindstandig ileostoma en fistula ani operatie.


ERVAREN PROBLEMEN

- Grote parastomale hernia.
- Gecompliceerd stoma op huidniveau van 50mm, meerdere huidplooiën en kuilvorming.
- Tot 4 keer per week lekkage met als gevolg peristomale huidschade. Gezien postuur en ligging van de stoma, afhankelijk van partner voor wissels. Daarom is het extra belangrijk dat lekkages onder controle zijn.

VERPLEEGKUNDIG ADVIES

Meerdere merken van 1-en 2-delige producten zijn zonder succes geprobeerd.

Inzet met eakin **dot**® 1-delig vlakke huidplaat in combinatie met eakin **Cohesive**® pasta om plooiën te vullen, vrij van alcohol zonder huidirritatie.

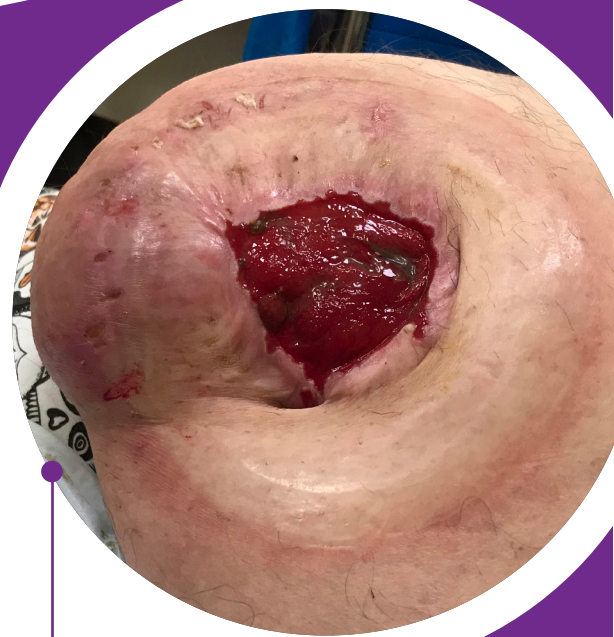

Voorheen

Verbeterde huid
met eakin **dot**[®]



SUCCESVOLLE OPLOSSING

Na één jaar zoeken naar een oplossing blijkt dat eakin dot[®] zich goed vormt naar de peristomale huid met plooivorming.

Huid: Lekkages zijn opgelost en peristomale huid is nu intact.

Stomaverzorging: Materiaalwissels zijn verminderd naar 1 keer per dag.

Onstuitbaar: Kwaliteit van leven is verbeterd - stomazorg is onder controle.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

eakin dot [®] 1-delig vlakke huidplak	840301
eakin Cohesive [®] pasta	839010

Dit betreft een individuele casestudy; de genoemde claims zijn gebaseerd op de ervaringen van de verpleegkundige en zijn niet onafhankelijk gevalideerd door eakin[®].

eakin.eu

