

eakin dot®

Kies eakin dot® 2-delig na herstel van een parastomale hernia

4 redenen voor inzet:

1. Keuze voor het juiste systeem is een belangrijk aspect in het algemene herstel na een operatie.¹
2. Doelstelling van verpleegkundige en patiënt is om een voorspelbare en betrouwbare draagtijd te behalen.²
3. Parastomale hernia's behoren tot de meest voorkomende complicaties onder stomadragers.³ Incidentie: 25-50%⁴
4. Post-operatief herstel verloopt niet altijd voorspoedig en vraagt een ander product of systeemkeus vanwege post-operatieve pijn of wondmanagement.

Case study door:

Felicity Rackham / Liz Meakin
Stoma consulenten, Epworth Eastern
Hospital Australië

References:


1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Burch J. 2018 Nursing strategies for the prevention and management of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a prevention programme 3(2):23-27

Patiënthistorie:

- Mevr. A. 73-jarige vrouw.
Hersteloperatie grote parastomale hernia.
- Wens om na operatie haar 2-delige convex systeem te blijven gebruiken vanuit gewoonte en vertrouwen.


Problemen:

- Aanhoudend ongemak laterale linkerzijde van stoma suggereert druk door convexiteit
- Lekkage door ongelijk huidoppervlak na hersteloperatie

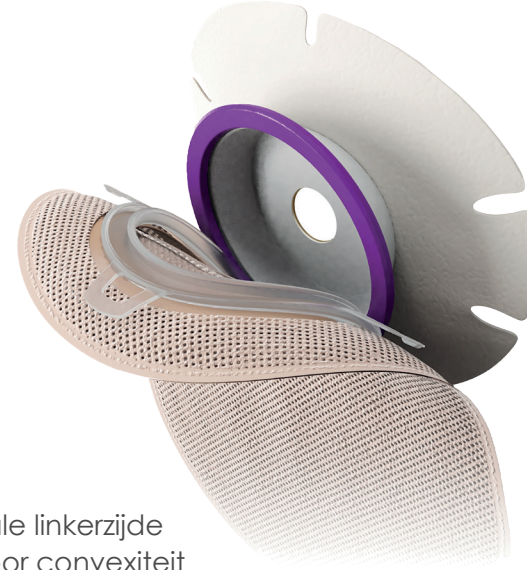


Verpleegkundige beoordeling:

- Huidbeschadiging rondom het stoma
- Drukplekken en tere huid aan rechterzijde convex huidplak
- Tekenen van huidbeschadiging aan randen van huidplak door veelvuldig wisselen

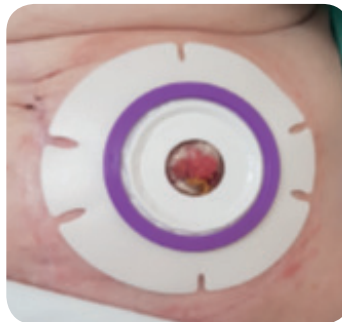

Verpleegkundig advies eakin dot® 2-delig:

- Minder pijn en drukplekken aan laterale zijde
- Mevr. A. voelt zich prettig om dit systeem zelf te wisselen

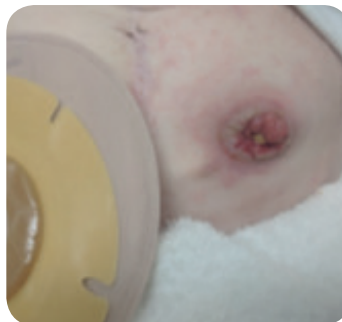

Resultaat:

- Huid voelt veel beter aan na 2 weken gebruik van eakin dot® 2-delig in combinatie met een pastaring
- Huidverbetering continueerde de weken nadien

Klinisch bewijs voor de keuze voor eakin dot® 2-delig:

- Verbeterd peristomale huid
- Gebruiksgemak
- *skinsmart*™ hydrocolloïd verlengt draagtijd
- Voldoet aan individuele behoefte van stomadragers