

Kies eakin dot® 2-delig: Vanuit verzorgend perspectief

4 redenen voor inzet:

1. Keuze voor het juiste systeem is een belangrijk aspect in het algemene herstel na een operatie.¹
2. Doelstelling van verpleegkundige en patiënt is om een voorspelbare en betrouwbare draagtijd te behalen.²
3. Indien men zich niet zelfstandig kan verzorgen, kan de stomazorg worden verleend door naasten of thuiszorg. Veel verzorgers maken zich zorgen om een huidplakwissel omdat dit schade kan aanbrengen aan de peristomale huid.³
4. eakin dot® 2-delig voldoet aan de behoefte van stomadrager en verzorging.

Case study door:


Kate Slattery,
Verpleegkundig adviseur,
TG Eakin Ierland

References:

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing and Residential Care 13(9) 432-436

Patiënthistorie:

- 80-Jarige getrouwde man
- Dhr. S. is in januari gediagnosticeerd met darmkanker
- Low anterior resectie en aanleg ileostoma
- Post-operatieve complicaties leiden tot vertraagd herstel en pas een maand na ingreep ziekenhuisontslag
- Dhr. S. kan zelfstandig de zakjes legen maar heeft hulp van zijn vrouw nodig bij wisselen

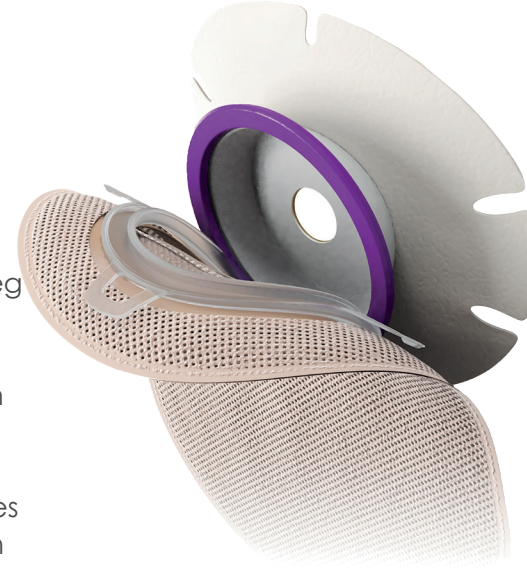

Verpleegkundige beoordeling:

- Dhr. S. startte met soft convex stomazakjes en een pastaring
- Dhr. S. en zijn vrouw werd geadviseerd elke 2-3 dagen de stomazak te wisselen. In praktijk werd een draagtijd van bijna 5 dagen gehaald
- **Lekkage en zichtbare huidirritatie**

Verpleegkundig advies eakin dot® 2-delig:

- Test met eakin dot® 2-delig en eakin **Cohesive** SLIMS®
- Huid binnen twee weken praktisch hersteld
- **Geen lekkage**
- Dhr. S. en zijn vrouw wisselen huidplak elke 4-5 dagen. Zakjes dagelijks.

Resultaat:

- Eenmaal bekend met het KLIK systeem voelde dhr. S. zich **comfortabel** en **zeker** in het koppelen van het zakje en de huidplak.
- Beiden zijn **erg tevreden** met de werking van eakin dot 2-delig en vinden het **veilig**, **comfortabel** en **eenvoudig** in gebruik.

Klinisch bewijs voor de keuze voor eakin dot® 2-delig:

- Verbeterd peristomale huid
- Gebruiksgemak
- **skinsmart™** hydrocolloïd verlengt draagtijd
- Voldoet aan individuele behoefte van stomadrager