

eakin Cohesive® stomawrap voor grote en moeilijk zichtbare stoma's



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Voorgeschiedenis

- 73 jarige dame, die heel actief was en van wandelen hield.
- 2011: Ruggermerginfarct doorgemaakt dat tot totale incontinentie heeft geleid.
- 2018: aanleg dubbelloops ileostoma.

Problemen

- Moeilijk stoma: aan rechterkant granulomen op het slijmvlies en aan linkerkant kantelt de stoma en steekt naar buiten.
- Moeilijk zichtbaar stoma.
- Peristomale huid is beschadigd t.g.v. constante lekkage.
- Slapeloosheid t.g.v. constante buikpijn en pijn aan stoma.
- Hoge wisselfrequentie huidplak: 5 x per week.
- Haar huidige 2-delig systeem werd als hard, groot en oncomfortabel ervaren.

Advies verpleegkundige

In eerste instantie naar een ander 2-delig systeem over gestapt, vervolgens naar 1-delig maar niets werkte.

Lekkages continueerden en de **peristomale huid bleef rood en pijnlijk**.

Met hulp en advies van **eakin®**, over gestapt naar eakin **dot®** 2-delig systeem met eakin **Cohesive®** stomawrap eronder. Deze pastaring is gekozen vanwege zijn unieke en ovale vorm en is daardoor makkelijk aan te brengen - als een wrap rondom de stoma voor extra veiligheid.

Oplossing met eakin Cohesive® stomawrap

Nieuwe dagelijkse routine

- Pastaring voorkwam dat er lekkages ontstonden met als gevolg dat de wisselfrequentie van 5 x per week gehalveerd werd.
- De wissels zijn sneller, het duurt maar 15 minuten.
- Onafhankelijkheid is hersteld en mevrouw kan vol vertrouwen haar stomamateriaal zelf wisselen.

Huid: peristomale huid is zienderogen verbeterd, geen lekkages meer.

Stomaverzorging: met een aanpassing van de mal en toevoeging van de stomawrap is een goede routine ontstaan.

Bigger Life: het vertrouwen is hersteld – na een lange weg van proberen, is de rust nu wedergekeerd en is mevrouw blij met haar stomazorg.



eakin.eu

Case study aangeleverd door:
Marjon Valk, Stoma en continëntie Verpleegkundige
Bernhoven Ziekenhuis, Uden