

Behandeling van granulomen

eakin
Cohesive[®]
seal

eakin
freeseal[®]

Een granuloom is een ophoping van hypergranulatieweefsel dat t.g.v. een ontsteking ontstaat, wanneer het immuunsysteem reageert op, of probeert om vreemde stoffen zoals hechtmateriaal in te sluiten^{1,2,3,4}

Hoewel de daadwerkelijke oorzaak van granulomen vaak onbekend is², zijn factoren die kunnen bijdragen onder meer:

- Hechtingen^{1,2,3}
- Terugkerende wondjes door verwijderen stomamateriaal^{2,5}
- Chronische irritatie door output^{2,5,6,7}
- Strakke kleding²
- Allergieën voor stomaproducten⁵



Hoewel zilvernitraat om granulomen dicht te schroeien de meest bekende behandeloptie is, kan het helpen om te proberen granulomen of verdere irritatie te voorkomen.

Lees verder om te zien hoe **eakin**[®] seals een succesvolle optie kunnen zijn bij het behandelen van granulomen.

Het gebruik van een **eakin®** seal kan helpen bij het behe



De meest absorberende pastaringen die er zijn!⁸

Beschermingslaag tussen de stoma en de huid, waardoor voorkomen wordt dat output de huid bereikt.



Huidvriendelijke formule

Minimaal aantal ingrediënten die huidvriendelijk zijn, ter voorkoming van irritatie.

eakin **Cohesive®**-Stomawrap™ voor grote stoma

Case study aangeleverd door: Marjon Valk, Stoma en continëntie Verpleegkundige Bernhoven Ziekenhui

Voorgeschiedenis

- 73 jarige dame, die heel actief was en van wandelen hield.
- 2011: Ruggenmerginfarct doorgemaakt dat tot totale incontinentie heeft geleid.
- 2018: aanleg dubbelloops ileostoma.

Problemen

- Moeilijk stoma: aan rechterkant granulomen op het slijmvlies en aan linkerkant kantelt de stoma en steekt naar buiten.
- Moeilijk zichtbaar stoma.
- Peristomale huid is beschadigd t.g.v. constante lekkage.
- Slapeloosheid t.g.v. constante buikpijn en pijn aan stoma.
- Hoge wisselfrequentie huidplak: 5 x per week.
- Haar huidige 2-delig systeem werd als hard, groot en oncomfortabel ervaren.

Advies verpleegkundige

In eerste instantie naar een ander 2-delig systeem over gestapt, vervolgens naar 1-delig maar niets werkte. **Lekkages continueerden** en de **peristomale huid bleef rood en pijnlijk**.

Met hulp en advies van **eakin®**, over gestapt naar eakin **dot®** 2-delig systeem met eakin **Cohesive®** Stomawrap eronder. Deze pastaring is gekozen vanwege zijn unieke en ovale vorm en is daardoor makkelijk aan te brengen - als een wrap rondom de stoma voor extra veiligheid.

Voor



meer van granulomen



Blijft op zijn plaats

Zachte en kneedbare pastaring die zorgt voor een goede pasvorm en op zijn plaats blijft, waardoor wrijving wordt voorkomen.



Langere draagtijd

Door lekkage te voorkomen wordt de draagtijd van het stomazakje verlengd, zodat er minder kans is op stripeffect van de huid of terugkerende irritatie.

's en slecht zicht

s, Uden

Oplossing met eakin Cohesive® Stomawrap™

Nieuwe dagelijkse routine

- Pastaring voorkwam dat er lekkages ontstonden met als gevolg dat de wisselfrequentie van 5 x per week gehalveerd werd.
- De wissels zijn sneller, het duurt maar 15 minuten.
- Onafhankelijkheid is hersteld en mevrouw kan vol vertrouwen haar stomamateriaal zelf wisselen.

Huid: peristomale huid is zienderogen verbeterd, geen lekkages meer.

Stomaverzorging: met een aanpassing van de mal en toevoeging van de Stomawrap™ is een goede routine ontstaan.

Groter leven: het vertrouwen is hersteld – na een lange weg van proberen, is de rust nu wedergekeerd en is mevrouw blij met haar stomazorg.



Bij het omgaan met peristomale huidcomplicaties en hypergranulatie

Casestudy ingediend door Marjon Gerbrands, Stomazorgverpleegster, Nederland

Achtergrond

- 69-jarige dame.
- 2017: Endeldarmkanker behandeld met chemotherapie en radiotherapie. Waarna remissie en in 'Wait and See'-studie.
- 2019: Recidief endeldarmkanker waarvoor APR met aanleg colostoma.

Ervaren problemen

- Vanaf 2020 pijn bij stoma zonder zichtbare afwijkingen.
- Later in 2020 bultjes bij stoma te zien, leek op oppervlakkige hypergranulatie.
- Behandeling met zilvernitraat, Terracotril, Aldanex, Lidocaine, pastaringen en Prontosan geen resultaat.
- 2021: Er volgde een stomarevisie. Dit leek eerst succesvol, maar er volgde een dehiscentie van de stoma, daarna kreeg ze een stoma op huidniveau.
- Er ontstonden wederom oppervlakkige, zeer pijnlijke bultjes. Behandeling met zilvernitraat deels succesvol, maar pijn bij stomarand bleef.
- Wegens pijnlijke huid 2-3 materiaalwissels per dag.

Verpleegkundig advies

Meerdere pastaringen en stomazakjes geprobeerd zonder succes. **Granulomen** en **pijnlijke peristomale huid** bleven bestaan.

eakin **freeseal**[®] met een eakin[®] soft convex stomazakje werd geadviseerd door Laura Han, stomaverpleegkundige, Haaglanden Medisch Centrum

Voor



De oplossing met eakin freeseal®

Na 2 jaar zoeken naar een oplossing heeft eakin **freeseal**® haar stomazorgroutine veranderd.

Huid: Granulomen zijn bijna verdwenen en de peristomale huid is volledig genezen.

Stomazorg: Slechts 1 wissel per dag zonder extra behandelingen.

Kwaliteit van leven: De dame voelt zich veilig in haar routine, heeft geen pijn meer en hoeft niet aan haar stoma te denken. Ze zegt:

“Ik heb eindelijk weer een normaal leven en ik ben een gewone stomadrager geworden!!”



Economische impact met eakin freeseal®

In dit geval zijn de dagelijkse stomazorgwisselingen teruggebracht van 2 á 3 tot slechts 1 keer per dag. Als gevolg hiervan:

Productverbruik is verminderd met **60%.***

Dit duidt op eventuele positieve effecten inclusief:

- Verminderde jaarlijkse kosten van stomaproducten.
- Geen extra producten nodig om de peristomale huidproblemen en granulomen te behandelen.
- Minder tijd aan zorg nodig om de complicaties van de stomadrager te behandelen.
- een positieve invloed op het milieu door minder productgebruik.

En, wat nog belangrijker is, **levensveranderende verbetering van kwaliteit van leven** voor de dame zelf.

*gebaseerd op het gemiddelde verbruik van zowel stomazakjes als pastaringen binnen deze casestudy.



In beide casestudy's werden de stomazorgrountines, na meer dan een jaar van uitdagingen en het gebruik van alternatieve producten en merken, aangepast om gebruik te maken van een **eakin**[®] seal.

De eerder ineffectieve routines waren nu een succes met **eakin**[®], resulterend in:



Langere draagtijd



Geen lekkage
meer



Verbeterde
conditie van de
peristomale huid



Verhoogd
comfort en het
vermogen om
terug te keren
naar dagelijkse
activiteit

Maak van **eakin**[®] seals uw
eerste keuze, **elke dag**

eakin[®] 

Tel.nr.: **0344-652351**

www.eakin.nl

info@eakin.nl